



PL 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 187/189
tel. +48 42 640 48 70, fax +48 42 688 33 84

Instrukcja używania zębów akrylowych

Wiedent ESTETIC



Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej www.wiedent.com.pl w zakładce oferta/zęby akrylowe/Zęby akrylowe Wiedent Estetic.

Przeznaczenie

Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC to wyrób medyczny klasy IIa przeznaczony do wykonywania protez ruchomych i stałych.

Opis

Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC zbudowane są z trzech warstw: szyjki, denty i szkliwa naśladując budowę zębów naturalne. Warstwa szyjki jest najbardziej miękka w celu zapewnienia elastyczności właściwego połączenia zęba z płytą protezy. Najtwardszą warstwą jest zewnętrzna warstwa szkliwa, jej twardość jest zbliżona do twardości zębów naturalnych. Zęby Wiedent ESTETIC, podobnie jak zęby naturalne, mają efekt fluorescencyjny. Są produkowane w 62 fasonach przednich górnych i dolnych oraz bocznych górnych i dolnych w dwóch gamach kolorystycznych - uniwersalnej V (16 kolorów) A1 - D4 oraz WIEDENT (13 kolorów) A1-R5. 14 wybranych fasonów jest produkowanych w dwóch wybielonych kolorach uniwersalnej gamy V - 0M1 i 0M3. Oferowany asortyment umożliwia uzupełnienie wszelkiego rodzaju ubytków w uzębieniu pacjentów zarówno pod względem kształtu jaki barwy. Zęby Wiedent ESTETIC spełniają wymagania norm międzynarodowych EN ISO 22112 i EN ISO 7491.

Surowce użyte do produkcji

Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC są produkowane z proszków - polimerów na bazie metakrylanu metylu i metakrylanu allilu zawierających nadtlenek benzoilu (PMMA) oraz pigmentów, a także z płynów - monomeru metakrylanu metylu (MMA) i dimetakrylanu 1,4 butandiolu (1,4 BDDMA).

Sposób postępowania

W celu zapewnienia dobrego łączenia zęba z masą na płyty protez, zęby akrylowe boczne posiadają głęboki relief poprzeczny. **W przypadku konieczności zeszlifowania tego reliefu zaleca się wykonanie retencji.** Przed osadzeniem zębów w masie na płyty protez należy usunąć wosk wrzątkiem oraz odtłuścić ząb monomerem akrylowym. Zęby wytrzymują temperaturę do 100°C i po procesie polimeryzacji przy łączeniu z masą na płyty protez zachowują powierzchnię błyszczącą, dającą się łatwo polerować.

Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności

- zagrożeniem dla protetyka może być wdech pyłu podczas szlifowania zębów,
- przy tych pracach zaleca się stosowanie wyciągu i maski przeciwpyłowej.

Producent zaleca umieszczenie w instrukcji dla pacjenta następujących wskazówek:

- protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych stosowane przez pacjenta niezgodnie z przeznaczeniem mogą stworzyć zagrożenie dla jego zdrowia ponieważ tak jak zęby naturalne są podczas użytkowania narażone na ścieranie powierzchni, ukszczenie lub całkowite wyłamanie z protezy,
- ruchome protezy zębowe wykonane z zębów akrylowych należy wyjmować z jamy ustnej na przerwę nocną,
- protezy zębowe należy myć szczoteczką do zębów używając pasty do zębów lub innych środków specjalnie przeznaczonych do pielęgnacji protez,
- protez zębowych nie należy moczyć w substancjach silnie alkalicznych lub kwaśnych aby uniknąć uszkodzenia powierzchni,
- protezy zębowe, które uległy uszkodzeniu, może naprawiać wyłącznie protetyk lub lekarz stomatolog,
- należy okresowo sprawdzać dopasowanie protez zębowych (szczególnie w przypadku protez stałych),
- protezy zębowe nie nadające się do dalszego użytku nie wymagają specyficznego traktowania, nadają się do recyklingu i mogą być usuwane wraz z odpadami komunalnymi.

Warunki przechowywania i transportu

Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC należy przechowywać w suchym i czystym miejscu. Podczas przechowywania i transportu należy zachować temperaturę od 3 do 30°C oraz unikać bezpośredniego nasłonecznienia i źródeł ciepła. Zęby akrylowe Wiedent ESTETIC trzeba zużyć w czasie nie dłuższym niż 10 lat od wyprodukowania szczególnie ze względu na możliwe obniżenie jakości opakowania.

Podstawa prawna

Zęby akrylowe WIEDENT Estetic spełniają wymagania Dyrektywy 93/42/EWG.

Stosowane symbole



Wytwórca



Przestrzegać instrukcji używania



Znak zgodności wyrobu z Dyrektywą 93/42/EWG z numerem Jednostki Notyfikowanej



Ograniczenie dopuszczalnych temperatur przechowywania



Chronić przed światłem słonecznym



Produkt jest wyrobem medycznym



Nr serii



Termin ważności

Data wydania: 17.08.2022



D 3322-11